

CATAROFT

Krople do oczu, roztwór

1. Co to jest CATAROFT i w jakim celu się go stosuje?

CATAROFT to nawilżający, izotoniczny roztwór do oczu, który zawiera dodatkowo jodek potasu. Należy go wkraplać do oka. Dodany jodek potasu działa jako substancja wychwytyjąca wolne rodniki. Takie właściwości jodku potasu stosuje się w zapobieganiu i leczeniu podtrzymującym wysięków i krwotoków w oku.

Bez konsultacji z okulistą preparat można stosować do zwykłego nawilżania oka i w tym celu należy wkropić go do oka lub zrobić okład na powieki. Produkt może być również pomocniczo stosowany do nawilżania oka podczas niektórych procesów wchłaniania (w szczególności wysięków, krwawień do ciała szklistego oraz zaćmy o różnej etiologii).

CATAROFT przeznaczony jest zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

2. Co należy wiedzieć przed użyciem kropli CATAROFT?

Nie stosować kropli CATAROFT w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu (patrz punkt 6).

Nie stosować kropli CATAROFT w następujących przypadkach:

- podczas ciąży i karmienia piersią,
- jeżeli u pacjenta stwierdzono przewlekłe ropne zapalenie skóry twarzy,
- jeżeli występuje skaza krwotoczna,
- u pacjentów z nieprawidłową czynnością tarczycy,
- u noworodków.

W przypadku stosowania innych preparatów okulistycznych, należy aplikować je nie wcześniej niż po 5 minutach od zastosowania kropli CATAROFT.

3. Stosowanie innych produktów wraz z CATAROFT

Zastosowanie kropli CATAROFT może wpływać na działanie równocześnie podawanych preparatów okulistycznych. Dlatego należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w przeszłości preparatach okulistycznych oraz tych, które będą w przyszłości przyjmowane, zarówno wydawanych bez recepty, jak i na receptę.

4. Jak stosować krople CATAROFT?


Okres przyjmowania i dawkę określa lekarz. Zazwyczaj stosuje się 1-2 krople do każdego oka od 2 do 4 razy dziennie do worka spojówkowego.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Przed zastosowaniem kropli CATAROFT należy ściągnąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe można założyć po co najmniej 20 minutach od zakroplenia kropli CATAROFT.

Sposób użycia

1. Umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję.
2. Odkręcić butelkę.

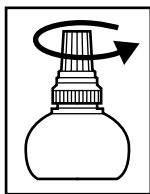

3. Butelkę skierowaną ku dołowi trzymać między kciukiem i palcem wskazującym.
4. Użyć palca, aby delikatnie odciągnąć powiekę ku dołowi.



5. Trzymać końcówkę zakraplacza blisko oka. Podczas stosowania końcówka zakraplacza nie może dotykać powierzchni oka oraz powieki.

6. Delikatnie ścisnąć butelkę, tak aby jedna kropla dostała się do oka a, następnie powoli zamknąć powieki.



7. Delikatnie ucisnąć palcem kącik oka przy nosie. Przytrzymać przez ok. 1 minutę, mając oko zamknięte.



8. Powyższe kroki powtórzyć dla drugiego oka, jeśli zostało zalecone przez lekarza.
9. Niezwłocznie po zastosowaniu zakręcić butelkę, aby końcówka zakraplacza nie uległa zabrudzeniu.

5. Możliwe działania niepożądane

Krople CATAROFT są zwykle bardzo dobrze tolerowane. Bezpośrednio po wkropleniu może pojawić się chwilowe, lekkie pieczenie lub klucie.

Bezpośrednio po zastosowaniu kropli CATAROFT może pojawić się krótkotrwałe nieostre widzenie, co może utrudnić prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. Należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn przez co najmniej 15 minut od zastosowania kropli CATAROFT.

Niekontrolowane i długotrwałe podawanie kropli (w zbyt dużych dawkach) u pacjentów wrażliwych może prowadzić do tzw. „jodyzmu”, podrażnienia i przekrwienia spojówek, nadmiernego łzawienia, obrzęku powiek (obrzęk Quinckego) i gruczołu łzowego. W przypadkach tych mogą również wystąpić następujące objawy skórne: zaczerwienienie, trądzik, zapalenie skóry i plamica.

W przypadku pojawienia się któregośkolwiek z wymienionych powyżej działań niepożądanych lub innych nietypowych reakcji, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

6. Co zawierają krople CATAROFT?

Chlorek sodu 2 mg/ml, jodek potasu, tiosiarczan sodu, wersenian disodu, dioctan chlorheksydyny, wodorotlenek sodu, woda do iniekcji.

7. Przechowywanie kropli CATAROFT i inne informacje

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze do 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności stanowi ostatni dzień miesiąca podany na opakowaniu.

Otwartą butelkę zużyć w ciągu 28 dni. Po zakropleniu CATAROFT należy natychmiast zakręcić butelkę.

Wielkość opakowania: 1 × 10 ml

 UNIMED PHARMA spol. s r.o.,
Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Słowacja

Dystrybutor w Polsce:

Ofta Sp. z o.o., Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 2U, 01-015 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2016

 2265

STERILE A

CATA10//010116