

Instrukcja używania

DEXOFTYAL®

— MD —

Dexoftyal MD to jałowe, lepkie, przezroczyste, nawilżające i odżywcze krople do oczu oparte na witaminie B5.

Prowitamina B5 wspomaga i wspiera procesy regeneracyjne rogówki. Dzięki właściwościom mukoadhezyjnym HydraFlexu film łzowy jest zachowywany tak, że powierzchnia oka jest lepiej chroniona.

Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

Dexoftyal MD chroni oko przed dolegliwościami takimi jak uczucie suchości i w przypadku zmęczonych i podrażnionych oczu. Po zastosowaniu kilku kropli uczucie dyskomfortu jest złagodzone lub całkowicie zredukowane.

Dexoftyal MD może być stosowany bez specjalnych ograniczeń i jest dobrze tolerowany.

Skład:

Deksantanol 2%, Hydroksypropyloceluloza (HydraFlex) 0,5%, Poliheksanid 0,0001%

Zastosowanie:

W przypadku podrażnienia lub pieczenia oczu, a także ich zaczerwienienia i uczucia zmęczenia, które mogą być wywołane przez różne czynniki, takie jak:

- podrażnienie spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych
- długotrwałe patrzenie na ekran bądź długotrwałe prowadzenie pojazdów: samochodu lub motocyklu
- klimatyzacja, wiatr, zanieczyszczenie powietrza, woda w basenie itp.

Sposób stosowania:

DEXOFTYAL MD można stosować na dwa sposoby: bezpośrednio do oczu lub za pośrednictwem soczewek kontaktowych.

A: Bezpośrednio do oczu: (osoby noszące szkła kontaktowe nie muszą ich wyjmować)

– przyłożyć palec wskazujący do dolnej powieki oka i lekko ją pociągnąć w dół

– postępując się drugą ręką, zbliżyć końcówkę pojemnika do dolnej powieki oka; uważać, aby końcówka nie dotykała powierzchni oka!

– zakropić 1 lub 2 krople do każdego oka i zamrużyć 2 lub 3 razy, aby preparat został równomiernie rozprowadzony na powierzchni całego oka

B: Za pośrednictwem soczewek kontaktowych:

– utożyć soczewkę na środkowym palcu;

– nałożyć 1 lub 2 krople na soczewkę, a następnie włożyć soczewkę do oka;

– zamrużyć okiem 2 lub 3 razy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:

Nie stosować razem z lekami do oczu, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nie używać w przypadku zakażenia oczu. Nie stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników preparatu.

Ostrzeżenia:

Nie stosować po 2 miesiącach od pierwszego otwarcia.

Nie stosować po terminie ważności.

Przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C.

Zamknąć butelkę bezpośrednio po użyciu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych objawów lub podrażnienia, należy skontaktować się ze specjalistą.

Działania uboczne:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu **Dexoftyal MD**.

Opakowanie:


15 ml **Dexoftyal MD**


Dystrybutor:

Verco S.A., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa


Objaśnienie użytych symboli:


 – Wyrób jałowy

 – Ostrzeżenia

 – Przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C

 – Termin ważności

 – Numer serii

 – Znak zgodności

 – Wytwórca

Wytwórca:

 TEGE Pharma B.V.
Minervum 7384
4817 ZH Breda, NL

 **0344**



05REF1001
DEXMD15/I/010216
Data aktualizacji: 11/2016


JAKOŚĆ W OKULISTYCE